

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE avseende rullstolen XLT från *Invacare*®

För våra kunders säkerhet vill vi råda brukare av rullstolen XLT, att vissa konfigurationer av rullstolen gör den olämplig att använda som sittplats vid transport i fordon.

Vi vill även påpeka att det *alltid* finns en risk med att sitta i rullstolen under transport i fordon.

Risken för skada vid en incident ökar när rullstolen har en låg rygg. Invacare avråder bestämt från användning av XLT som säte i fordon om ryggstödet är lägre än 40 cm.

Råd om åtgärder som skall vidtas:

Om du är ägare av en XLT rullstol med ryggstöd lägre än 40 cm vill vi att du ska täcka över "krok"etiketten med en varningsetikett. Varningsetiketten får du av Invacares Kundservice.



Manualen har ändrats. Senaste versionen kan laddas ner från Invacares hemsida – www.invacare.se. Alternativt kan du kontakta Kundservice, där du kan beställa en kopia av den senaste versionen av manualen till din rullstol.

Försäkra er om att denna information görs tillgänglig för all berörd personal inom er organisation och/eller kundkrets och att uppmärksamhet upprätthålls under lämplig tid.

Myndigheterna har informerats om detta ärende.

Om du har frågor eller önskar mer information, vänligen kontakta Kundservice:

Tel. 08-761 70 90

Fax. 08-761 81 08

Med vänlig hälsning
Invacare AB

Lena Åhl
Produktchef Manuella rullstolar

INVACARE AB

Fagerstagatan 9 • Box 66

163 91 Spånga

Tel: 08-761 70 90 • Fax: 08-761 81 08

sweden@invacare.com • www.invacare.se

Transportera rullstol i fordon

Rullstolarna från Invacare Rea är designade för att erbjuda bästa möjliga komfort och säkerhet i det vardagliga livet. Det betyder att det kompromisser behöver göras för att produkten ska bli användbar. Vid transport i bil är det alltid säkrast att åka i bilens säte med säkerhetsbälte fastspänt. Du bör om möjligt alltid åka i bilens säte med säkerhetsbälte fastspänt. Om det av någon anledning är omöjligt att använda bilens säte vid transport kan rullstolen användas som bilsäte om följande regler och föreskrifter följs.

Vi vill påpeka att det alltid finns en risk med att sitta i rullstolen vid transport i bil. Risken för skada vid en incident ökar när rullstolen har en låg rygg. Ju lägre rygg desto större risk för skada. Invacare avråder därför bestämt från användning av XLT som säte i fordon om ryggstödet är lägre än 40 cm.

Även om Invacare Reas produkter och följande regler är tänkta att öka säkerheten vid transport i fordon, kan passagerare i fordon ändå skadas om en olycka skulle inträffa. Invacare lämnar inga garantier för utgången av en eventuell olycka vid transport av rullstol och brukare i fordon.

INVACARE AB

Fagerstagatan 9 • Box 66
163 91 Spånga
Tel: 08-761 70 90 • Fax: 08-761 81 08
sweden@invacare.com • www.invacare.se