

**VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE****Det här säkerhetsmeddelandet innehåller viktig information angående säker drift av Welch Allyn CP200 (EKG-apparat med valfri spirometri)**

**FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Welch Allyn har fastställt att denna enhet inte har några brister. Welch Allyn tar tillvara på det här tillfället att hjälpa våra kunder att använda enheten på rätt sätt.**

Kära Welch Allyn CP 200™ användare:

Innan CP 200 genererar en EKG-rapport i normalt Auto EKG-läge, kräver CP 200 att du anger ett patient-ID. Utskriften av EKG-rapporten kommer då att visa patient-ID. Detta för att undvika risken att en rapport förknippas med fel patient.

Emellertid har CP 200 ett **Auto EKG-läge** där användaren kan åsidosätta det krävda patient-ID:t. Dessutom genererar **Stat EKG-läge** en EKG-rapport utan tillhörande patientidentifikatorer. Utskriften av EKG-rapporten kommer då att inte visa patient-ID. Sådana rapporter utan patientidentifikatorer kan även skrivas ut vid ett annat tillfälle av användaren med skärmen "Skriv ut kopia". Om du väljer att rutinemässigt använda antingen Stat EKG-läge eller Auto EKG-läge utan patient-ID ska du:

**Alltid** skriva patient-ID-informationen på rapportutskriften och även på alla andra utskriftskopior omedelbart efter EKG-undersökningen. På så sätt undviker du risken att en rapport förknippas med fel patient. Den här instruktionen kommer du att se flera gånger i bruksanvisningen.

Då användaren - efter att ha skrivit ut ett **Stat EKG** för en patient - inte lämnar efterutskriftsskärmen för Auto EKG, och ansluter CP 200 till en ny patient, och sedan av misstag trycker på skärmen "Skriv ut kopia" i stället för Auto EKG-knappen, kommer användaren att felaktigt skriva ut en kopia av föregående patients EKG-rapport. Användaren kan då tro att den utskrivna kopian tillhör den nya patienten. För att undvika att anknypa en rapport till fel patient, ska du alltid följa bruksanvisningarna. Särskilt ska du, om du väljer att arbeta i Stat EKG-läge eller utelämnar patient-ID i Auto EKG-läge:

1. **Alltid** avsluta skärmen för efterutskrift i Auto EKG genom att trycka på knappen Avsluta efter att ha skrivit ut en EKG-rapport.
2. **Alltid** trycka på Auto EKG-knappen för att få en EKG-rapport för nästa patient.

Dessa två grundläggande steg beskrivs i kapitel 5 i bruksanvisningen till CP 200. CP 200 har även "snabbinstruktioner" tryckta på den blå pappersluckan, med bland annat en bild av Auto EKG-knappen.

**Som ett alternativ till att använda funktionen "Skriv ut kopia" kan användaren välja att ta bort detta genom att installera den bifogade programuppgraderingen.** Den kommer att skriva ut EKG-rapporter utan anknutna patientidentifierare till en enda kopia. Denna programstyrda utskriftsbegränsning kommer att hindra att utskriftskopior anknys till fel patienter.

Tillsammans med det här meddelandet bifogas:

- SD-kort för programuppgradering till Version 2.5
- Bruksanvisning (Innefattar bruksanvisningen och tillägget för uppdatering t.o.m. programvaruversion 2.5)
- Försättsblad 714531 som innehåller information om programuppgradering och installation

Om du har några frågor, kontakta din lokala försäljningsrepresentant eller Welch Allyn Technical Support:

Canada 1-800-561-8797	Europeisk telefoncentral +353-46-906-7790	Tyskland +49-69-509-85-132	Latinamerika +1-305-669-9003	Singapore +65-6419-8100
Storbritannien +44-207-365-6780 (tryck 2)	Australien +61-29-638-3000	Kina +86-216-327-9631	Frankrike +33-1-5569-5849 (tryck 1)	Japan +81-33-219-0071
Nederländerna +31-202-061-360	Sydafrika +27-11-777-7555	Sverige +46-85-853-6551		

Hälsningar



Director, International Quality Assurance & Regulatory Affairs