



**VIKTIGT UTBILDNINGSMEDDELANDE TILL ANVÄNDARE AV
CONSTELLATION®**

<Datum> 2010

<Sjukhus/Kontonamn>

<Till: Namn> [Sjukhusadministratör]

<Adress nr 1>

<Adress nr 2>

ANG.: Utbildningspaket för användare av Constellation® Vision System (bilaga)
OBS! Distribueras till samtliga användare av Constellation® Vision System

Bästa <Namn>: [Sjukhusadministratör]

Efter att ha fått kommentarer från kunder om deras erfarenhet av CONSTELLATION® har Alcon identifierat både systemfunktions- och maskininställningar som kan påverka infusionsfunktionen hos CONSTELLATION® Vision System.

Just nu samarbetar Alcon dessutom med myndigheter för att få tillstånd att gå vidare med uppdateringar av programvara och maskinvara för att förbättra hela systemets tillförlitlighet.

Alcon har även identifierat vissa problem med maskinmontering eller -inställningar som eventuellt påverkar infusionsstrycket. I dessa ingår följande:

- Översättning av ACCURUS®-infusionsinställningar till ett ekvivalent CONSTELLATION®-värde.
 - PEL-inställningar
 - Probflödesegenskaper
- Förstå PEL (Patient Eye Level) och dess effekt på flödesfunktionen.
- Förstå CONSTELLATION®-funktionen efter ett fel i systemet eller systemavstängning/-fel.

Det bifogade utbildningspaketet innehåller beskrivande och ingående information för användarna av CONSTELLATION® Vision System som fattar beslut om maskininställningar. Utbildningspaketet är direkt riktat mot skillnaderna mellan ACCURUS® Surgical System och CONSTELLATION® Vision System. Eftersom användarna fattar sina medicinska beslut om maskininställningar i relation till infusionsstryck är det mycket viktigt att de är medvetna om dessa skillnader mellan ACCURUS® Surgical System och CONSTELLATION® Vision System.

Din säljrepresentant från Alcon kirurgi kommer att kontakta dig inom kort för att följa upp utbildningsmaterialet och för att besvara dina eventuella frågor. Din representant från Alcon teknisk service kommer att kontakta dig när vi fått tillstånd att leverera uppdateringarna av programvaran och maskinvaran till ditt system.

Om du behöver hjälp eller har frågor om CONSTELLATION® Vision System är du välkommen att kontakta din säljrepresentant från Alcon kirurgi eller Alcon teknisk service hos Alcon Sverige AB, Box 12233, 102 26 Stockholm, telefonnummer 08-634 40 00.

Vänliga hälsningar

Alcon Sverige AB, Box 12233, 102 26 Stockholm, telefonnummer 08-634 40 00