

1 februari 2010

## ANGELÄGEN KORRIGERING - ÅTERKALLELSE

### Viktigt säkerhetsmeddelande

**Till:** chefen för radiologiavdelningen  
chefen för avdelningen för nuklearmedicin ansvarig  
för riskhantering  
användarna av e.cam SPECT-kamera med alternativet Profile Attenuation Correction

**Ärende:** Uppdatering av maskinvara för profilvinge

Bästa kund!

Vi vill göra er uppmärksamma på en korrigeringsåtgärd som behövs för ert/era) e.cam SPECT-kamerasystem med alternativet Profile AC. Denna korrigeringsåtgärd är nödvändig för att förhindra ett potentiellt säkerhetsproblem.

Vi har upptäckt att Profile vingen kan rubbas när den har kolliderat med ett föremål och eventuellt utgöra en säkerhetsrisk. Även om det är högst osannolikt att ni kommer att uppleva problemet kommer Siemens att uppdatera ert system för att korrigera det potentiella problemet genom att lägga till ytterligare hårdvara till er Profile vingenhet.

Innan korrigeringen har utförts och som en försiktighetsåtgärd **ber vi er göra en visuell inspektion av systemet enligt beskrivningen i användarhandboken innan en bildtagning påbörjas, för att säkerställa att stödbalken är ordentligt låst. Se till att alla områden har kontrollerats så att det inte finns några hinder (t.ex. utrustning, personal) i banan för detektorerna eller transmissionskällans hållare under rörelse.**

Om ni har fått det här brevet har vi konstaterat att ändringen behövs för ert e.cam-system. En servicerepresentant från Siemens kommer att kontakta er inom de närmaste dagarna för att ordna ändringen, som inte kommer att kosta er något.

### Siemens Medical Solutions USA, Inc.

Molecular Imaging

2501 N. Barrington Rd  
Hoffman Estates, IL 60192, USA

Tel: (847) 304-7700

[www.siemens.com/medical](http://www.siemens.com/medical)

CAN 001-2010  
Sida 2 av 2  
1 februari 2010

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter och försäkrar er om att vi ska avhjälpa problemet så snabbt som möjligt, så att ni kan ha fullt förtroende för Siemens produkter även i fortsättningen. Om ni har frågor om detta viktiga säkerhetsmeddelande ber vi er kontakta er servicerepresentant. Ni kan också kontakta vårt kontor på 800-888-7436 (USA).

Med vänliga hälsningar



Ron Nolte  
Vice President, Quality & Regulatory Affairs  
CAN 001-2010

**Siemens Medical Solutions USA, Inc.**

Molecular Imaging

810 Innovation Drive  
Knoxville, TN 37932-2751

Tel: (865)218-2000

[www.siemens.com/medical](http://www.siemens.com/medical)