

Viktigt säkerhetsmeddelande

Förhöjd grind till EVAB Patientsäng
2010-06-21

Typ av åtgärd.

Återkallelse av produkt.

Datum: 2010-06-21

Viktigt:

Uppgifter om berörda produkter

Förhöjd grind , artikelnummer 720080, 720070, 20421, 20420 till EVAB Patientsäng och akutvagn.
Grindarna är tillverkade mellan 2008-12-15 och 2009-10-19

Beskrivning av problemet

Grindarna med ovanstående artikelnummer har upptäckts ha ett för stort avstånd mellan sängramen och understa grindribban vilket kan innebära att patient klämmer sig/fastnar mellan grinden och sängen.

Råd om åtgärd som användaren bör vidta.

Grindarna skall återlämnas till tillverkaren för att ersättas med nya. För att identifiera grindarna bifogas ritning 21410. Höjden på stolpen är 430mm.

Råd om hur säkerhetsmeddelandet bör kommuniceras.

Meddelandet skickas ut internt till ansvariga på avdelningar där produkterna finns.

Kontaktperson:

Per Olofsson
Proton Engineering
Box 123
Mellangatan 1
568 23 Skillingaryd

Tel (direkt): 0370-69 26 63

per.olofoffson@proton.se

Undertecknad bekräftar härmed att detta meddelande har rapporterats till berörd regulatorisk myndighet.

Med vänlig hälsning

Per Olofsson
Teknisk Chef


