

## **Field Safety Notice (FSN)**

Varubeteckningen av de berörda produkterna: Mini Crosser T-modell, E-modell och Nordic producerade före januari 2007.

FSCA – identifikator: 6-10-2008

Typ av åtgärd: Enhets modifikation.

Datum: 05.10.2009

Attention: Distributörer och kunder.

### **Identifiering av berörda produkter:**

Scooter med nedanstående kriterier och innehållet i förteckningen över modeller är berörda av denna FSN:

<b>T-modell</b>	<b>E-modell och Nordic</b>
Producerad före januari 2007	Producerad före januari 2007
Detta kan identifieras utifrån serienummer på scootern.	Detta kan identifieras utifrån serienummer på scootern.
Serienummer hittas på en grå etikett baktill på scootern.	Serienummer hittas på en grå etikett baktill på scootern.
Serienummer kan till exempel vara: 16285-05-10.	Serienummer kan till exempel vara: 16285-05-10.
16285 är ett fortlöpande nummer. 05 är produktionsåret. 10 är produktionsmånaden.	16285 är ett fortlöpande nummer. 05 är produktionsåret. 10 är produktionsmånaden.
Så denna scooter är producerad i oktober 2005 och är därmed berörd av denna FSN.	Så denna scooter är producerad i oktober 2005 och är därmed berörd av denna FSN.



## Förteckning över berörda modeller:



### Mini Crosser 3W

Mini Crosser 125T 3W ,13km/h

Mini Crosser 130T 3W ,15km/h

Mini Crosser 140T 3W ,15km/h

Mini Crosser 140T 3W ,10km/h

MiniCrosser 130T 3W "Junior" 15 km/h

Mini Crosser Nordic 3W

Mini Crosser E-model 3W

### Mini Crosser 4W

MiniCrosser 125T 4W ,13km/h

MiniCrosser 130T 4W ,10km/h

MiniCrosser 130T 4W ,15km/h

MiniCrosser 140T 4W ,15km/h

MiniCrosser HD, 10km/h

Mini Crosser E 115 Kid 4W ,15 Km/h

MiniCrosser 130T 4W "Junior" 15 km/h

Mini Crosser Nordic 4W

Mini Crosser E-model 4W



Mini Crosser T-modell




Mini Crosser E-modell, Nordic



## Beskrivning av problemet:

Det har förekommit 10 incidenter med brand eller påbörjad brandutveckling (överhettning/rökutveckling) på Mini Crosser T-model, E-model och Nordic scooter. En brand kan endast förekomma om fordonet är startat och i användning. Det kan inte ske vid laddning av batterierna.

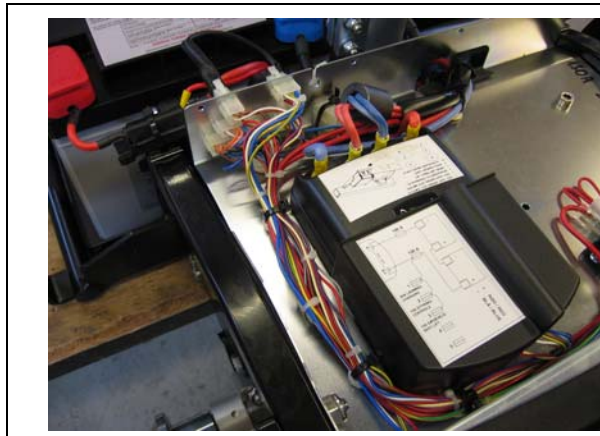

Överupphettningen har skett i området runt elektroniken.

## Potentiell risk

I betraktning av det antal scooter som Mini Crosser har producerat genom åren och det antal scooter som har bränt är risken mindre än 0,04 % (mindre än 1 utav 2500).

## Rekommenderad handling som brukaren bör följa:

### Handling 1: (korrigerande)

Alla berörda scooter skall programmeras om gällande elektroniken för att skydda motorn och elektroniken mot överhettning: Vänligen kontakta din närmaste Hjälpmedelscentral eller leverantören Minicrosser AB för en avtal om tid att få programmera om elektroniken.

### Minicrosser AB

Bultgatan 28

442 40 Kungälv

Tfn: 0303-24 52 00

Om du upplever rök eller dålig lukt från scootern så stäng av scootern omedelbart och sluta att använda den. Använd den inte förrän den har blivit servad.



## Handling 2: (korrigerande)

Vi har ändrat vår serviceintervall till att scootern skall genomgå förebyggande underhåll varje år (motsvarande 500 drifttimmar) av säkerhetsmässiga skäl. Bruksanvisningen kommer att uppdateras med den nya specifikationen, som är relevant för elektriska scooter typ Mini Crosster T-model, E-model och Nordic. Tidigare var det specificerat att förebyggande underhåll skulle utföras vart tredje år (motsvarande 1 500 drifttimmar).

Beskrivningen i den uppdaterade bruksanvisningen kommer bli:

Mini Crosster är säkerhetsmässigt beräknad för användning i minst 10 år, dock max 5000 drifttimmar, under förutsättning att den genomgår service- och säkerhetsöversyn varje år, motsvarande ca 500 drifttimmar. Servicen skall antingen föregås av Minicrosser AB, eller hos auktoriserad verkstad.

**VIGTIGT:** Av säkerhetsmässiga skäl är det av största vikt att intervallet gällande service- och säkerhetsöversyn efterföljs för att minimera risken för bromssvikt, kortslutning i ledningar med eventuell värmeutveckling och brand som följd.

Bakgrunden till att skicka ut detta brev är att förhindra att någon kommer till skada. Vänligen informera berörda personer som i dag använder någon modell som omfattas av denna specifikation. Informationsbrev gällande innehållet i denna specifikation skall skickas ut till alla berörda.

**Produktionsbolaget bekräftar att detta meddelande har blivit anmält till Läkemedelsverket.**

 **Mini Crosster A/S**

Klaus Smedegaard

R&D Manager

Mob: +45 61 20 98 85

[www.minicrosser.dk](http://www.minicrosser.dk)

[k.smedegaard@minicrosser.com](mailto:k.smedegaard@minicrosser.com)