

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden

Kommunikationsproblem på pumpsystem i MiniMed™ 600-serien

Meddelande

Insulinpump	Modellnummer
MiniMed™ 640G insulinpump	MMT-1711, MMT-1712, MMT-1751, MMT-1752
MiniMed™ 670G insulinpump	MMT-1761, MMT-1762, MMT-1781, MMT-1782

September 2022

Medtronic-referens: FA1272

[EU MDR: Enskilt registreringsnummer \(SRN\) för tillverkare i EU: US-MF-000023100](#)

Bästa vårdgivare,

Du får detta brev eftersom våra register visar att en eller flera av dina patienter använder en insulinpump i MiniMed™ 600-serien. För deras säkerhets skull vill vi informera dig om ett potentiellt problem förknippat med det kommunikationsprotokoll som används av dessa insulinpumpar. Obehörig åtkomst till kommunikationsprotokollet av en insulinpump kan äventyra dess insulindosering. I detta brev beskrivs de åtgärder som era patienter bör vidta. Läs noga igenom informationen i "Brev till pumpanvändare" som bifogas. Vi kommer att skicka det via e-post till de användare som vi har mejladresser till.

Vänligen var förberedd på att patienter kontaktar dig angående detta säkerhetsmeddelande.

Ytterligare information:

Vi förstår att detta kan påverka din och patientens upplevelse och vi är här för att hjälpa dig. Ytterligare information finns på www.medtronic.com/security.

Det bästa din patient kan göra nu för att eliminera risken för en felaktig insulindosering är att stänga av fjärrbolusfunktionen på pumpen, permanent. Vi kommer att fortsätta att aktivt bevaka situationen och delar relevant information och eventuella åtgärder med dig och dina patienter i framtiden.

Den behöriga myndigheten i ditt land har meddelats om denna åtgärd. Vi är engagerade i att kontinuerligt övervaka och förbättra din upplevelse av våra produkter och kommer proaktivt att dela viktiga säkerhetsuppdateringar. Om du har ytterligare frågor ska du kontakta din Medtronic-representant.

Vänliga hälsningar



Bilaga:

- Brev till pumpanvändare